



Viking XS / Viking S

Kurzgebrauchsanweisung

Deutsch

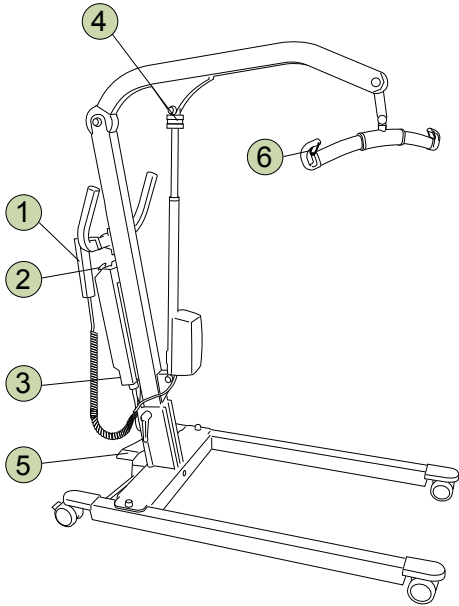


1 Handbedienung

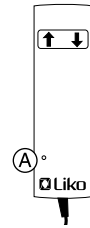

- ⬆️ Auf
- ⬇️ Ab
- Ⓐ Geringe Akkuladung

2 Not-Aus


Aktivierung:

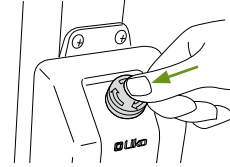


Entriegelung:




5 Einstellen des Fahrgestells

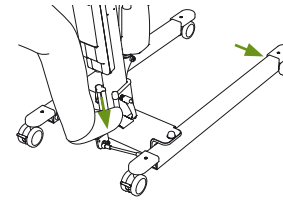


6 Sicherheitshäkchen

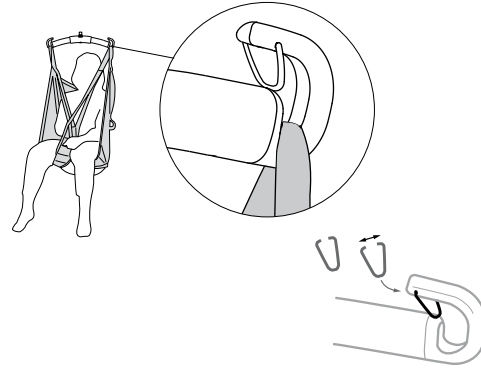


3 Elektrische Notabsenkung

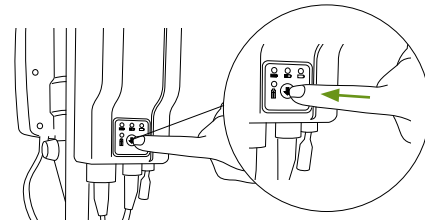


4 Mechanische Notabsenkung

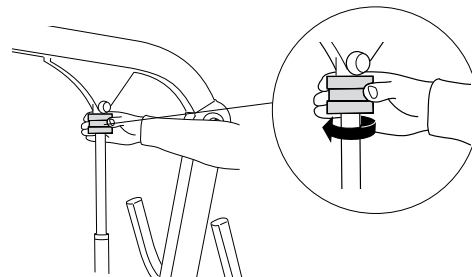

Aufladen des Akkupacks

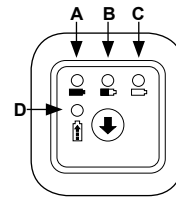

- Ladezustand der Akkus**
- A** Grün: mindestens 50 %
 - B** Gelb: 25–50 %
 - C** Gelb: 0–25 %
 - D** Ladevorgang läuft.

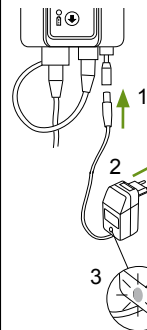

- Lifter regelmäßig nach Gebrauch laden.
- Beim Ladevorgang ist der Lifter nicht betriebsbereit.
- **Beim Ladevorgang muss der Not-Aus-Schalter entriegelt sein.**

- 1 - gelbes Licht - lädt
- 2 - grünes Licht - Ladezustand wird aufrechterhalten.
- 3 - (Symbol for emergency stop)

Ergonomie

- Nie manuell heben! – Den Lifter die Arbeit machen lassen.
- Nicht hetzen! – Ruhig und methodisch arbeiten.
- Den Rücken schonen! – In Schrittstellung mit geradem Rücken arbeiten.
- Die Höhenverstellung des Bettes nutzen.
- Körnernah arbeiten! – Kurze Hebel.

Reinigung

Lifter bei Bedarf mit heißem Wasser oder Desinfektionsmittel reinigen.

Störungstabelle

Prüfen Sie, ob

- der Not-Aus-Schalter entriegelt ist
- die Akkus geladen sind
- die Handbedienung korrekt angeschlossen ist.

Weitere Kurzgebrauchsanweisungen

Kurzgebrauchsanweisungen für Liko Patientenlifter und Hebegurte stehen unter www.liko.com zum Download bereit.

© Copyright Liko AB



Sicherheitsvorschriften

- Vor der Anwendung Gebrauchsanweisungen für Lifter und Zubehör lesen.
- Transfer sorgfältig planen.
- Bevor der Pflegebedürftige angehoben wird, immer prüfen, ob die Hebeschlaufen am Hehebügel richtig eingehakt sind. Hierzu den Hehebügel etwas anheben, um Spannung auf die Hebebänder zu bringen.
- Das Bedienpersonal ist in die Handhabung einzuweisen.
- **Tragfähigkeit: 160 kg**

Die Tragfähigkeit setzt die Verwendung von Zubehör mit mindestens gleicher Tragfähigkeit voraus.

ⓘ ACHTUNG!

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Lifters, die unter www.liko.com zum Download bereit steht.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Hersteller:

Liko AB
975 92 Luleå
Schweden
info@liko.se