



Cura e manutenzione delle imbragature Liko

Italiano
7IT160884-02
2012-01-17

Le imbragature Liko sono monouso. Per evitare la possibile trasmissione di malattie infettive, è importante pulire l'imbragatura se è contaminata o se deve essere utilizzata da un altro paziente.

Le imbragature Liko sono prodotte in diversi tessuti, con diverse caratteristiche. Le imbragature devono essere lavate in lavatrice. Le temperature per il lavaggio e l'asciugatura sono presenti sull'etichetta del prodotto. L'asciugatura deve essere fatta appena possibile dopo il lavaggio, preferibilmente con una macchina asciugatrice. Per quanto riguarda l'asciugatura, alcuni prodotti non possono essere asciugati a macchina e alcuni ad alte temperature.

Diverse imbragature Liko contengono materiali di rinforzo; ad esempio, supporti per le gambe e supporti per schiena e testa. Questo materiale può essere lavato a 60-80°C. A temperature più elevate, il materiale di rinforzo può deformarsi, diventare rigido e quindi compromettere il comfort. La sicurezza dell'imbragatura generalmente non viene intaccata.

È importante seguire le istruzioni di cura e manutenzione consigliate altrimenti la garanzia verrà invalidata e la durata utile dell'imbragatura verrà ridotta.

Istruzioni di lavaggio:

Seguire le istruzioni di lavaggio presenti sull'etichetta del prodotto.



Rimuovere le stecche di rinforzo in plastica (laddove applicabile).



Se necessario, effettuare il prelavaggio a basse temperature, 25-30°C. Alcune piccole macchie potrebbero sparire più rapidamente a temperature più basse.



Lavare in lavatrice alla temperatura indicata. Utilizzare il detergente.



Asciugare a basse temperature, massimo 50°C o nell'asciugatrice.



Niente candeggio.



Niente lavaggio a secco.



Niente stiratura.

Pulizia ad alcool

Per le stecche di rinforzo e i prodotti rivestiti con rete in plastica, si consiglia il lavaggio con il 70% di etanolo o il 45% isopropanolo. Le stecche in plastica possono essere anche lavate con sapone solubile in acqua. Tuttavia, alcuni dettagli, ad esempio le cinghie e le cuciture, potrebbero essere di materiale diverso e potrebbero dover essere lavate in lavatrice per una pulizia accurata.

Pulizia


Per la disinfezione termica, lavare a 65°C per almeno 10 minuti o a 71°C per almeno 3 minuti. In entrambi i casi consigliamo di aggiungere 8 minuti per garantire che il calore penetri nel tessuto e che la pulizia sia assicurata. È importante ultimare il programma di lavaggio con un ciclo di risciacquo.

(Rif. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS)

Controllare l'imbragatura dopo il lavaggio

Tutti i punti sono ispezionati al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Cinghie
- Cuciture
- Occhielli di sospensione
- Fibbie (laddove applicabile)

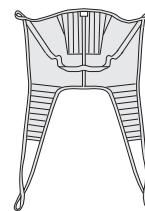

L'imbragatura ha una durata utile limitata ed è un elemento importante per la sicurezza. Non utilizzare imbragature danneggiate. Il protocollo per l'ispezione periodica può essere utilizzato come riferimento per il controllo delle parti più importanti per ciascun modello di imbragatura. Le imbragature in tessuto poliestere hanno una durata utile maggiore rispetto alla rete di poliestere. Le maniglie su determinate imbragature sono pensate per il direzionamento. Un carico troppo pesante su di esse può far rompere l'imbragatura.

Prodotti Solo

I prodotti Liko Solo sono prodotti monouso, pensati per uso singolo. I prodotti Solo non devono essere lavati, ma gettati quando contaminati o quando il paziente non ne ha più bisogno.



Non lavare.



Non utilizzare.

Se un prodotto Solo viene lavato, viene visualizzato questo simbolo, a indicare che il prodotto non deve essere utilizzato ma smaltito.

Panoramica sulle istruzioni di lavaggio per il tessuto

		Poliestere	Rete di poliestere	Cucitura a catena a forma di orsetto, in poliestere	Rete in tessuto plastificato	Tessuto plastificato	Telo di riposizionamento RepoSheet poliestere/cotone	Telo barella LiftSheet 1900 cotone/poliestere	Tessuto Solo	HandySheet e HandyTube in poliamide	Prolunga ad occhielli, cinghie per barella
Lavare a 60-80°C		X	X	X	X	X				X	
Lavare a 60-85°C		X ¹						X			X
Lavare a 85°C							X				
Niente lavaggio a secco									X		
Niente candeggio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asciugatura, a basse temperature, max. 50°C		X	X	X				X		X	
Asciugatura, a temperatura normale, max. 70°C							X				X
Non asciugare a macchina					X	X			X		
Stiratura, max. 150°C							X ²	X ²			
Senza stirare		X	X	X	X	X			X	X	X
Niente ammorbidente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Niente lavaggio a secco		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Può essere lavato con alcool					X	X					
Disinfezione termica		X	X	X	X	X	X	X		X	X

¹ Art. n. 3526111, 3526115, 3526116, 3526117

² Stirato dal lato interno (il lato senza cinghie)



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Produttore:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se